



PAPILOCARE®

Gel vaginal

Gel reepitelizante de la zona de transformación cervical para la prevención y el tratamiento coadyuvante de las lesiones causadas por el VPH

Recomendaciones de uso. Producto sanitario útil para:

- Controlar y reepitelizar la zona de transformación cervical para prevenir el riesgo de lesiones (LSIL) provocadas por el VPH
- El tratamiento coadyuvante de las lesiones intraepiteliales causadas por el VPH
- Reparar y reepitelizar las lesiones de la mucosa cérvico-vaginal
- El tratamiento de la sequedad de la mucosa cérvico-vaginal
- Reequilibrar la microbiota vaginal
- Mejorar la salud vaginal
- Crear las condiciones para una rápida curación de las lesiones causadas por rascado debido al escozor y prurito

En los casos de lesiones que provocan picor y/o prurito: forma una película protectora que reduce rápidamente las molestias, creando las condiciones adecuadas para favorecer el proceso natural de cicatrización.

Modo de empleo: Aplicar una cánula monodosis en la zona vaginal, preferiblemente antes de acostarse. Presionar el envase para vaciar su contenido y retirar suavemente sin aclarado. Desechar la cánula monodosis. Se recomienda aplicar una vez al día durante 21 días y luego en días alternos, en función de la prescripción médica.

Modo de acción. Gel vaginal cuyas propiedades permiten:

- Formar una barrera defensiva en la zona de transformación cervical para prevenir el riesgo de integración del VPH
- Mejorar el proceso de curación cuando se emplea como coadyuvante en el tratamiento de las lesiones intraepiteliales causadas por VPH en la mucosa cérvico-vaginal

Principales acciones de los componentes de Papilocare®, Gel Vaginal:

- **Niosomas de ácido hialurónico:** su acción principal es la hidratación superficial de tejidos, proporcionándoles elasticidad
- **Niosomas de β-glucano:** por sus propiedades antioxidantes mantiene la estructura y la funcionalidad natural de la piel y membranas mucosas
- **Fitosomas de Centella asiática:** acción reparadora de las mucosas
- **BioEcolia®:** alfa-oligoglucano que estimula el crecimiento de la flora bacteriana beneficiosa y reequilibra la microbiota en la zona cérvico-vaginal
- **Aloe vera:** acción hidratante, reepitelizante y reparadora de la zona cérvico-vaginal
- **Coriolus versicolor:** acción reepitelizante de las lesiones y microlesiones cérvico-vaginales
- **Extracto de Neem:** acción emoliente que favorece el proceso natural de cicatrización con alivio del enrojecimiento y picor

Advertencias: No utilizar en personas con hipersensibilidad conocida a alguno de sus ingredientes. Si tras la aplicación experimenta molestias en su utilización, suspenda su uso y consulte a su médico. En caso de embarazo, consultar con el médico antes de su uso.

Sin perfume. pH=5
Favorece las relaciones sexuales
Compatible con preservativos

Presentación: 7 cánulas monodosis de 5 ml

Conservar el producto en lugar fresco y seco
Mantener fuera del alcance de los niños

Procare
Health
Naturally woman

Respuestas PARA LA
mujer de hoy



PROCARE HEALTH IBERIA, S.L.
Av. Miguel Hernández 21, Bajo
46450 Benifaió (Valencia) - España



PI 010/004/006



PAPILOCARE®

Gel vaginal

Gel réépidémisant de la zone de transformation cervicale
pour la prévention et le traitement coadjuvant
des lésions provoquées par le HPV

Recommandations d'utilisation. Dispositif médical utile pour :

- Contrôler et réépidémiser la zone de transformation cervicale pour prévenir le risque de lésions (LSIL) provoquées par le HPV
- Le traitement co-adjuvant des lésions intraépithéliales provoquées par le HPV
- Réparer et réépidémiser les lésions de la muqueuse cervico-vaginale
- Le traitement de la sécheresse de la muqueuse cervico-vaginale
- Rééquilibrer le microbiote vaginal
- Améliorer la santé vaginale
- Créer les conditions d'une guérison rapide des lésions provoquées par les irritations dues aux brûlures et aux démangeaisons

Dans les cas de lésions qui provoquent picotements et prurit : forme une pellicule protectrice qui réduit rapidement l'inconfort, créant les conditions adaptées pour favoriser le processus naturel de cicatrisation.

Mode d'emploi : Appliquer une canule unidose dans le vagin, de préférence avant le coucher. Appuyer sur le tube pour le vider de son contenu puis enlever délicatement. Sans rinçage. Jeter la canule unidose. La posologie recommandée est d'une application quotidienne pendant 21 jours puis 1 jour sur 2, en fonction de la prescription médicale.

Mode d'action. Gel vaginal dont les propriétés permettent de :

- Former une barrière défensive au niveau de la zone de transformation cervicale pour prévenir le risque d'intégration du HPV
- Améliorer le processus de guérison lorsqu'il est utilisé comme coadjuvant dans le traitement des lésions intra-épithéliales, causées par le HPV dans la muqueuse cervico-vaginale

Propriétés principales des composants de Papiocare®, Gel Vaginal :

- **Niosomes d'acide hyaluronique :** sa principale action est l'hydratation superficielle des tissus, apportant l'élasticité
- **Niosomes de β -glucane :** grâce à leurs propriétés antioxydantes, ils favorisent le processus naturel de réparation de la peau et des muqueuses
- **Phytosomes de Centella asiatica :** action réparatrice des muqueuses
- **BioEcolia® :** alfa-oligoglucane qui stimule la croissance de la flore bactérienne bénéfique et rééquilibre le microbiote de la zone cervico-vaginale
- **Aloe vera:** action hydratante, réépidémisante et réparatrice de la zone cervico-vaginale
- **Coriolus versicolor :** action réépidémisante des lésions et microlésions cervico-vaginales
- **Extrait de Neem :** action émolliente qui favorise le processus naturel de cicatrisation et soulage les rougeurs et les démangeaisons

Avertissement : Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité connue à l'un des ingrédients. Si vous ressentez un quelconque désagrément à la suite de l'application, arrêtez l'utilisation et consultez votre médecin. En cas de grossesse, consultez votre médecin avant utilisation.

Sans parfum. pH=5
Facilite les relations sexuelles
Compatible avec l'usage de préservatifs

Présentation : 7 canules unidoses de 5ml

Conserver dans un lieu frais et sec
Tenir hors de portée des enfants



Solutions pour
la femme
d'aujourd'hui

Distributeur en France :
PROCARE HEALTH FRANCE SAS
67 avenue André Morizet
92100 Boulogne-Billancourt - France